

Praktický postup pro efektivní odsátí hlenů u dítěte

Odsávání s Baby-Vac 2 je 100% bezpečné od narození, věk není omezen. Pro větší efektivitu a pohodlí doporučujeme kombinovat odsávání s použitím hypertonické mořské vody podle následujících bodů:

1. Sestavte odsávačku vložení nastavce do jímkky.



2. Adaptér vložte do hadice vysavače. Použijte elektronickou regulaci vysavače nebo otevřete okénko na hubici a tím upravte tah podle hustoty hlenů. Použit lze i centrální vysavač.



3. Prvním odsátím hlenů odsávačkou Baby-Vac odstraňte z největší části volně pohyblivé hleny z nosní dutiny. Dítě lze odsávat v náručí nebo vleže na zádech. Ústa by měla být otevřená.

4. Aplikujte hypertonickou mořskou vodu do obou nosních dírek a nechte ji působit 2 až 3 minuty. Hleny se zředí a osmotickým působením se sníží otok nosní sliznice, což vede k uvolnění ucpaného nosu.



5. Odsajte hleny ze zprůchodněných dutin.



6. Do takto vyčištěné nosní dutiny aplikujte nosní kapky s vazokonstrikčními látkami, které zajistí další oplasknutí sliznice. Nechte je cca 5 minut působit.

7. Naposledy odsajte hleny a zbytky nosní vody.

Výhradní dovozce pro ČR:

Morchella s.r.o.
Koželužská 101
537 01 Chrudim
Web: www.babyvac.cz
Tel: 776 216 086
MMS: 705 007 601

Váš prodejce Baby-Vac: